

TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA SILK TRIANGLE

SCHEMA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO: 06.30.18.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) Nr:
31407/R

**DESCRIZIONE PRODOTTO: PROTESI MAMMARIA ESTERNA
DEFINITIVA SILK TRIANGLE**

MATERIALI DI FABBRICAZIONE: Realizzata al 100% in silicone medicale microfiltrato a tripla densità differenziata, rivestimento al 100% film di poliuretano effetto seta "seno naturale".

CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:

Protesi realizzata in silicone medicale a tripla densità, forma anatomica simmetrica triangolare leggermente rotondeggiante.

Il processo di fabbricazione porta ad ottenere una protesi il 30% inferiore di peso specifico rispetto ad una versione tradizionale.

La parte a contatto con la cute della donna è realizzata in silicone super soft a bassa densità molecolare con speciale rivestimento per ottenere una gradevole sensazione al tatto effetto seta.

Disponibile dalla taglia 1° alla taglia 17°.

Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice.

GARANZIA:

La protesi è garantita 24 mesi da difetti di fabbricazione.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% Silicone medicale microfiltrato a tripla densità con peso specifico inferiore al 30% rispetto ad una versione tradizionale, parte esterna 100% film di poliuretano effetto seta "seno naturale".



INDICAZIONI D'USO:

Dopo mastectomia semplice o totale modificata.

CODICI E TAGLIE:

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004061	1	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004062	2	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004063	3	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004064	4	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004065	5	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004066	6	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004067	7	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004068	8	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004069	9	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004070	10	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004071	11	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004072	12	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004073	13	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004074	14	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004075	15	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004076	16	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004077	17	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio

La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna.

CURA E IGIENE DELLA PROTESI:

- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretano provocando la fuori uscita del silicone medicale
- In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi
- Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detersivi aggressivi o alcool
- Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette
- Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi
- Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola
- Dopo l'uso si consiglia di riporre la protesi nella sua confezione per mantenere la forma naturale

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.



Mediland Srl