

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA SUBLIME ARIS

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO: 06.30.18.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
1887526/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: Protesi mammaria esterna definitiva
Sublime Aris



CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:

Protesi esterna mammaria definitiva realizzata in silicone medicale microfiltrato a doppia densità. Forma anatomica simmetrica triangolare che segue la linea naturale del seno.

Sublime Aris è un modello di protesi dall'aspetto naturale sia all'interno del reggiseno che indossata con il costume da bagno.

La parte posteriore della protesi presenta un design a nido d'ape per ridurre l'area di contatto alla cute e aumentare la ventilazione.

Ambidestra, profilo del seno medio, disponibile dalla taglia 3 alla taglia 14, fornita di foderina esterna al 100% in Coolmax per la protezione della cute in soggetti particolarmente sensibili.

La protesi è Latex Free, priva di lattice

GARANZIA:

24 mesi da difetti di fabbricazione

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% silicone medicale microfiltrato a doppia densità, parte esterna 100% film di poliuretano, foderina di protezione 100% Coolmax.

INDICAZIONI D'USO:

Dopo intervento chirurgico per mastectomia semplice o totale modificata.

CODICI E TAGLIE

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004185	3°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004186	4°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004187	5°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004188	6°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004189	7°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004190	8°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004191	9°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004192	10°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004193	11°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004194	12°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004195	13°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004196	14°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio

La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per l'uso con protesi mammaria esterna.

CURA E IGIENE DELLA PROTESI:

- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretano provocando la fuori uscita del silicone medicale
- In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi
- Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detersivi aggressivi o alcool
- Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette
- Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi
- Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola
- Dopo l'uso si consiglia di riporre la protesi nella sua confezione per mantenere la forma naturale

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

