

## SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA ACTIVE FLOW

|                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUTTORE                                             | TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND |
| DISTRIBUTORE                                           | Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)                           |
| CODICE ISO                                             | IN ARRIVO                                                                                |
| REPERTORIO DM SSN<br>(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) | IN ARRIVO                                                                                |
| CND                                                    | IN ARRIVO                                                                                |

### DESCRIZIONE GENERALE

Protesi esterna mammaria per svolgere attività sportive o per il tempo libero incluso il nuoto sia in acqua salata, termale, dolce. Internamente alla protesi sono inserite delle micro sfere perline in monoprene che oltre a fornire la forma anatomica e il movimento naturale del seno, nel caso che la donna prenda il sole da sdraiata, si schiacciano come avviene per il seno naturale. Esternamente come rivestimento la protesi Active Flow utilizza uno speciale tessuto tecnico CoolMax fresco, morbido e confortevole. Forma della protesi anatomica, ambidestra, disponibile dalla taglia 1 alla taglia 14, adatta per ogni tipo di forma del seno. Il prodotto è Latex Free, privo di lattice

| IMMAGINE ARTICOLO                                                                 | DATI TECNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In uso per svolgere attività sportive, per il tempo libero, per il nuoto sia in acqua dolce, termale che salata.</li> <li>• La protesi va indossata con un reggiseno oppure con un costume da bagno predisposto per protesi mammaria esterna.</li> <li>• Non indossare protesi con anelli o braccialetti, potrebbero danneggiare il rivestimento esterno.</li> <li>• In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso.</li> <li>• La protesi va lavata a mano con acqua tiepida.</li> <li>• Non usare detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcool.</li> <li>• Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza.</li> <li>• Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto.</li> </ul> |

### DIMENSIONI

| CODICE | TAGLIA | VERSIONE   | FORMA     | PROFILO SENO    |
|--------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 004200 | 1      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004201 | 2      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004202 | 3      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004203 | 4      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004204 | 5      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004205 | 6      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004206 | 7      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004207 | 8      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004208 | 9      | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004209 | 10     | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004210 | 11     | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004211 | 12     | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004212 | 13     | ambidestra | anatomica | tutti i profili |
| 004213 | 14     | ambidestra | anatomica | tutti i profili |

### INFO UTILI

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| UNITÀ CONFEZIONAMENTO | Pz. 1                                |
| ACCESSORI             | /                                    |
| GARANZIA              | 24 mesi da difetti di fabbricazione. |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.