

SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA E - SUPREME

PRODUTTORE	TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	06.30.18.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 30913/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Protesi realizzata al 100% in gel di silicone medicale con parte esterna al 100% in film di poliuretano super soft effetto pelle naturale. Forma anatomica simmetrica ambidestra a goccia che segue la linea naturale del seno. E-Supreme ha l'aspetto naturale del seno sia all'interno del reggiseno che del costume da bagno. La densità differenziata del gel di silicone replica il normale movimento del seno naturale. Disponibile dalla taglia 1° alla taglia 17°, la viene fornita con una foderina in cotone di protezione. Indicata nei casi di mastectomia semplice o radicale modificata. La protesi è Latex Free, non contiene lattice.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale. • In caso di unghie lunghe utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso. • La protesi va lavata a mano con acqua tiepida. • Non usare detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcol. • Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza. • Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto. • Una volta utilizzata, la protesi va rimessa nel suo contenitore per mantenere la forma naturale. • La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna. • 100% gel di silicone medicale microfiltrato, parte esterna al 100% film di poliuretano super soft effetto pelle naturale. • INDICAZIONI D'USO: Dopo mastectomia semplice o totale modificata.

DIMENSIONI

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
003510	1	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003511	2	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003512	3	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003513	4	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003514	5	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003515	6	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003516	7	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003517	8	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003518	9	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003519	10	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003520	11	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003521	12	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003522	13	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003523	14	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003524	15	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003557	16	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno
003558	17	ambidestra	simmetrica a goccia	da medio a pieno

INFO UTILI	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni da difetti di fabbricazione.
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	



