

SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA SILK TEARDROP

PRODUTTORE	TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	06.30.18.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 32009/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Protesi realizzata al 100% in silicone medicale microfiltrato a tripla densità con rivestimento al 100% in film di poliuretano effetto seta al tatto "seno naturale". Forma anatomica simmetrica a goccia leggermente concava nella parte a contatto con la pelle per ottenere una migliore traspirabilità e maggior comfort durante l'uso.

Il 30% di leggerezza minore, è realizzato tramite l'impiego di un nuovo processo produttivo rispetto ad una versione tradizionale.

Il minor peso della protesi fornisce un vantaggio per ottenere una migliore postura del tronco e delle spalle.

La protesi è Latex free, non contiene lattice.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretanoprovocando la fuoruscita del silicone medicale. - In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi. - Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detergenti aggressivi o alcool. - Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette. - Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi. - Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola. - Dopo l'uso si consiglia di riporre protesi nella sua confezione per mantenere la forma naturale. - La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna. - Dopo mastectomia semplice o totale modificata. 100% silicone medicale microfiltrato a tripla densità, rivestimento esterno 100% film di poliuretano effetto seta "seno naturale".

DIMENSIONI

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004089	1	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004090	2	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004091	3	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004092	4	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004093	5	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004094	6	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004095	7	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004096	8	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004097	9	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004098	10	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004099	11	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004100	12	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004101	13	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio
004102	14	ambidestra	simmetrica a goccia	da basso a medio

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	24 mesi da difetti di fabbricazione.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.