

SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA SILK TRIANGLE

PRODUTTORE	TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	06.30.18.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 31407/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Protesi realizzata in silicone medicale a tripla densità, forma anatomica simmetrica triangolare leggermente rotondeggiante. Il processo di fabbricazione porta ad ottenere una protesi il 30% inferiore di peso specifico rispetto ad una versione tradizionale. La parte a contatto con la cute della donna è realizzata in silicone super soft a bassa densità molecolare con speciale rivestimento per ottenere una gradevole sensazione al tatto effetto seta. Disponibile dalla taglia 1° alla taglia 17°. Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretano provocando la fuoriuscita del silicone medicale. • In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi. • Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detergenti aggressivi o alcool. • Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette. • Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi. • Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola. • Dopo l'uso si consiglia di riporre la protesi nella sua confezione per mantenere la forma naturale. • La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna. • INDICAZIONI D'USO: Dopo mastectomia semplice o totale modificata. • 100% Silicone medicale microfiltrato a tripla densità con peso specifico inferiore al 30% rispetto ad una versione tradizionale, parte esterna 100% film di poliuretano effetto seta "seno naturale".

DIMENSIONI

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004061	1	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004062	2	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004063	3	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004064	4	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004065	5	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004066	6	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004067	7	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004068	8	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004069	9	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004070	10	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004071	11	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004072	12	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004073	13	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004074	14	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004075	15	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004076	16	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio
004077	17	ambidestra	simmetrica triangolare	da basso a medio

INFO UTILI	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	24 mesi da difetti di fabbricazione.
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

