

SCHEDA TECNICA - PROTESI MAMMARIA ESTERNA SUBLIME ARIS

PRODUTTORE	TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	06.30.18.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 1887526/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Protesi esterna mammaria definitiva realizzata in silicone medicale microfiltrato a doppia densità. Forma anatomica simmetrica triangolare che segue la linea naturale del seno.

Sublime Aris è un modello di protesi dall'aspetto naturale sia all'interno del reggiseno che indossata con il costume da bagno.

La parte posteriore della protesi presenta un design a nido d'ape per ridurre l'area di contatto alla cute e aumentare la ventilazione.

Ambidestra, profilo del seno medio, disponibile dalla taglia 3 alla taglia 14, fornita di foderina esterna al 100% in Coolmax per la protezione della cute in soggetti particolarmente sensibili.

La protesi è Latex Free, priva di lattice.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro in poliuretano provocando la fuoriuscita del silicone medicale. • In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi. • Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detergenti aggressivi o alcool. • Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette. • Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi. • Non lasciare la protesi all'aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la superficie della protesi opacizzandola. • Dopo l'uso si consiglia di riporre protesi nella sua confezione per mantenere la forma naturale. • La protesi va indossata con un reggiseno predisposto per l'uso con protesi mammaria esterna. • INDICAZIONI D'USO: Dopo intervento chirurgico per mastectomia semplice o totale modificata. • 100% silicone medicale microfiltrato a doppia densità, parte esterna 100% film di poliuretano, foderina di protezione 100% Coolmax.

DIMENSIONI

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004185	3°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004186	4°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004187	5°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004188	6°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004189	7°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004190	8°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004191	9°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004192	10°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004193	11°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004194	12°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004195	13°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio
004196	14°	ambidestra	simmetrica triangolare	medio

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	24 mesi da difetti di fabbricazione.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.