



PAWS

UNITA' DI PROPULSIONE ELETTRICA



REHASENSE





THIIS.
RETAILERS'
CHOICE PRODUCT
OF THE YEAR 2021

SU REHASENSE

Con un portafoglio completo di soluzioni per la mobilità e l'assistenza, il nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti libertà e indipendenza, supportandoli nella loro vita familiare, sociale e professionale.

Per raggiungere questo obiettivo, pensiamo fuori dagli schemi quando ricerchiamo le future soluzioni di mobilità e sviluppiamo costantemente

i nostri prodotti e le nostre conoscenze. Le dinamiche aziendali sono caratterizzate da una struttura aziendale agile e dal rispetto reciproco.

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia nel marchio Rehasense e nei suoi prodotti.

I MIGLIORI ESPERTI DI TECNOLOGIA

La squadra interdisciplinare di Rehasense è composta da specialisti in ingegneria, design del prodotto e industria dei beni di lusso con decenni di esperienza professionale. Rehasense è specializzata in prodotti innovativi di qualità per il mercato della riabilitazione, con particolare attenzione alla sicurezza, alla conformità, al design e alla funzionalità. La gamma di prodotti comprende ausili per la mobilità

come rollator, dispositivi aggiuntivi di alimentazione, carrozzine, letti di cura, ausili per il trasferimento e rampe.

Tutti i prodotti offerti sono fabbricati in conformità al nostro Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato, conforme agli standard internazionali ISO 9001 e ISO 13485 e ai requisiti legali del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR).

„Il nostro obiettivo è migliorare la mobilità, l'indipendenza e la qualità della vita delle persone e offrire loro un futuro più luminoso. Questo è ciò che Rehasense rappresenta”.

Roger Dutton
CEO Rehasense Group



POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS

PAWS è il complemento di potenza ideale per la vostra carrozzina: PAWS combina ergonomia e funzionalità con un design accattivante e trasforma la carrozzina manuale in un veicolo entusiasmante. Andate al lavoro in autonomia, fate shopping o esplorate nuovi posti. PAWS è un'ottima alternativa all'auto e vi permette di godervi la vostra vita in modo indipendente.

Sono disponibili tre modelli di PAWS. Il modello City, con ruote da 12" e 14", ha un passo corto e un raggio di sterzata ridotto ed è ideale per l'uso in casa o su strade scorrevoli. Il Cruiser ha una ruota da 16" ed è adatto per l'uso su terreni più impegnativi. Il Tourer ha una ruota da 20" ed è disponibile con due larghezze di pneumatici: uno da 2" per tutti gli usi e uno da 4" per i terreni più accidentati.

Ogni PAWS crea nuove storie di libertà, che si tratti di incontrare familiari e amici, partecipare ad attività condivise o intraprendere un'avventura in solitaria. Migliorate la vostra indipendenza con PAWS.



Rainer Kuschall,
pilota, inventore,
designer e cofondatore
di PAWS

„La mia visione era quella di sviluppare il miglior componente aggiuntivo elettrico per gli utenti di carrozzine. In collaborazione con il team di ricerca e sviluppo, abbiamo raggiunto il livello successivo nelle unità propulsive di spinta.

Sono particolarmente orgoglioso delle funzioni MORSETTO ELETTRICO e SOLLEVAMENTO ELETTRICO. Credo davvero che PAWS sia un prodotto rivoluzionario. Io stesso sono tetraplegico e nel corso degli anni non ho mai trovato una unità propulsiva che soddisfacesse tutte le mie esigenze. Per questo era importante per me assicurarmi che PAWS fosse il più facile da usare e il più sicuro possibile.

L'innovativo meccanismo di bloccaggio e sollevamento automatico, in combinazione con i comandi tetra, è fantastico per gli utenti affetti da varie condizioni mediche, in cui non sono interessate solo le funzioni della mano e del braccio.

Anche gli utenti con vari disturbi muscolari possono utilizzare PAWS grazie alla combinazione AUTO-AUTO/TETRA. Pertanto, PAWS offre alle persone in carrozzina di tutto il mondo nuove opportunità e le aiuta a godere della loro ritrovata indipendenza. Spero che anche voi possiate vivere ogni tipo di avventura con il vostro PAWS in futuro”.

CITY

SPERIMENTARE UNA MOBILITÀ ILLIMITATA

Lasciate che PAWS faccia parte della vostra mobilità quotidiana: andate al lavoro con facilità e fate la spesa comodamente. PAWS City è disponibile con ruote motrici da 12 o 14 pollici ed è progettato principalmente per la guida in città e su superfici stradali lisce. Con un raggio di sterzata ridotto a un metro, il City si trova a suo agio anche in un ambiente interno. Dalle superfici dure e piane ai marciapiedi leggermente irregolari e ai cordoli appiattiti, PAWS City vi porta dove volete.



COMANDI TETRA

I comandi Tetra consentono di guidare facilmente, anche con forza e controllo ridotti della parte superiore del corpo.

AGGANCIO SENZA SFORZO ALLA TUA CARROZZINA

Con i MORSETTI e il SOLLEVAMENTO completamente AUTOMATICI, il processo di bloccaggio e sbloccaggio, così come il sollevamento e l'abbassamento, sono eccezionalmente facili e confortevoli per l'utente.

Configurazione illustrata: City 14 " con comandi tetra, MORSETTI e SOLLEVAMENTO AUTOMATICI

CRUISER

GODETEVI LA VOSTRA INDIPENDENZA

Per chi ama muoversi, PAWS Cruiser è la scelta perfetta. Questo potente accessorio per carrozzine manuali è versatile, sia in città che lungo i sentieri della foresta. La ruota motrice da 16" vi trasporta in sicurezza su terreni leggermente irregolari e vi apre un nuovo mondo di indipendenza. Godetevi una giornata rilassante con PAWS Cruiser.



MORSETTI MANUALI

Grazie allo sgancio rapido MORSETTO MANUALE, il processo di bloccaggio e sbloccaggio è molto semplice. Non sono necessarie modifiche o aggiunte al telaio. Una volta completato l'aggancio, il SOLLEVAMENTO MANUALE consente di sollevarsi in posizione di guida utilizzando il pulsante di rilascio sul manubrio.

Configurazione illustrata: Cruiser 16", comandi standard, MORSETTI E SOLLEVAMENTO MANUALE

TOURER

SCOPRIRE NUOVI LUOGHI CON PAWS

Vi piace andare in posti nuovi? Con PAWS Tourer potrete sentirvi sicuri anche in luoghi inesplorati. Progettato principalmente per l'uso fuoristrada, il PAWS Tourer è in grado di superare sabbia, ghiaia, ciottoli e molto altro ancora. PAWS Tourer ha il passo più lungo della gamma PAWS. Così, mentre la grande ruota motrice da 20" supera radici e terreni sconnessi, offre anche una guida fluida e stabile durante l'utilizzo.

SUGGERIMENTO

Equipaggiando il vostro Tourer con la ruota motrice larga 4" (FAT TYRE), lo renderete ideale per la vostra prossima avventura fuoristrada. Questa configurazione vi permetterà di raggiungere facilmente luoghi che sarebbero difficili per altri modelli.



MORSETTI AUTOMATICI

Configurazione illustrata: Tourer 20" con pneumatico 4" FAT, comandi standard, MORSETTI e SOLLEVAMENTO AUTOMATICI

CARATTERISTICHE SPECIALI


1 PAWS È COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE CARROZZINE PRESENTI SUL MERCATO

PAWS vanta un'eccezionale compatibilità, per integrarsi con quasi tutte le carrozzine presenti sul mercato grazie a una varietà di morsetti.

Questa adattabilità fa sì che quasi tutti i modelli di carrozzina presenti sul mercato possano essere combinati con PAWS. Questo vale per tutti i modelli di carrozzine manuali, con telaio rigido e pieghevole, e anche per quelli con pedane rimovibili.

Abbiamo sviluppato soluzioni di bloccaggio speciali per tutti i modelli di carrozzina conosciuti che non sono realizzati con telaio tondo, come il telaio K2 di Küschall o il profilo ovale di altri produttori*.

Importante: si sconsiglia l'uso di PAWS con carrozzine in fibra di carbonio. Rehasense non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.

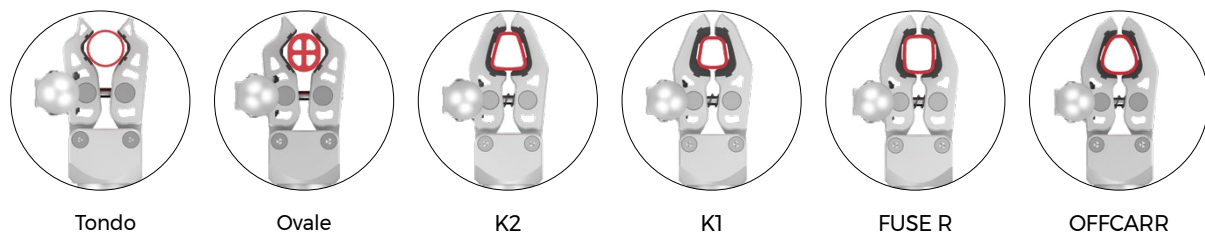


2 MORSETTO E SOLLEVAMENTO AUTOMATICO

IL PRIMO AL MONDO

Grazie alle innovative funzioni MORSETTO ELETTRICO e SOLLEVAMENTO ELETTRICO, il processo di aggancio e sollevamento è molto semplice. Ciò è possibile anche in presenza di funzioni ridotte delle dita e della mano e di una forza limitata. È sufficiente inserire la carrozzina nei morsetti, premere il pulsante rosso sul manubrio e poi l'interruttore di rilascio. I morsetti si chiudono e si bloccano automaticamente e la carrozzina viene sollevata senza sforzo in posizione di guida.

SOLLEVAMENTO ELETTRICO: sollevamento e abbassamento automatico

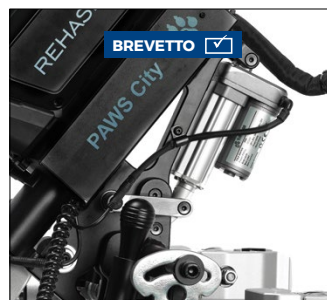

MORSETTO ELETTRICO: bloccaggio e sbloccaggio automatico



3 SISTEMA DI SERRAGGIO ADATTABILE IN MODO FLESSIBILE

PAWS ha il sistema di aggancio più semplice e universale del mercato. Con i MORSETTI MANUALI o AUTOMATICI è possibile il funzionamento manuale o completamente automatico. Una volta che la carrozzina è entrata nei morsetti, può essere bloccata e sbloccata manualmente su entrambi i lati utilizzando le leve. Il vantaggio dei MORSETTI MANUALI è che ci vogliono solo cinque secondi per collegare

e scollegare PAWS alla carrozzina. Il meccanismo di blocco e sblocco automatico di PAWS si attiva comodamente premendo un pulsante. L'ampia gamma di possibilità di regolazione e adattamento garantisce un facile montaggio su una varietà di carrozzine pieghevoli e a telaio rigido. Grazie al sistema di bloccaggio e regolazione universale, non sono necessarie ulteriori modifiche alla carrozzina.



MORSETTI AUTOMATICI per un facile aggancio



MORSETTI MANUALI

FUNZIONE DI SOLLEVAMENTO

A seconda della configurazione, sono possibili due modi di sollevamento del PAWS. Una volta completato l'aggancio, è possibile sollevarsi in posizione di guida con il SOLLEVAMENTO MANUALE utilizzando la leva di rilascio sul manubrio. Con il SOLLEVAMENTO AUTOMATICO si viene sollevati automaticamente in posizione di guida. Iniziare premendo il pulsante rosso. A questo punto avete 20 secondi per azionare l'interruttore di rilascio sul manubrio per avviare il meccanismo automatico di bloccaggio e sollevamento. Questa soluzione è stata sviluppata specificamente per gli utenti che hanno una limitata funzionalità e forza delle mani.

Importante: si noti che PAWS è disponibile anche con funzionalità ibrida, ovvero con combinazione di MORSETTI AUTOMATICI e SOLLEVAMENTO MANUALE o MORSETTI MANUALI e SOLLEVAMENTO AUTOMATICO. Se avete bisogno di una di queste versioni, contattateci per maggiori informazioni.

*Per qualsiasi domanda in merito, contattaci info.italy@rehasense.com

CARATTERISTICHE SPECIALI

4

COMANDI TETRA

LA SOLUZIONE INNOVATIVA PER I TETRAPLEGICI

Le funzioni limitate della mano, spesso associate a una grave paraplegia, rappresentano una sfida particolare per l'utilizzo di un'unità di propulsione.

Di conseguenza, i tetraplegici hanno raramente avuto l'opportunità di utilizzare i dispositivi elettrici aggiuntivi e di godere dell'indipendenza che possono offrire. Questo è un aspetto che volevamo cambiare!

Il risultato: comandi tetra che possono essere azionati con facilità e sicurezza anche da utenti con funzioni della mano assenti o limitate.

STABILITÀ


I manubri TETRA sono disponibili con braccio orizzontale o verticale, per utenti destri e mancini. Se necessario, possono anche essere combinati.

La forma ergonomica delle impugnature e le opzioni di regolazione individuale garantiscono una stabilizzazione bilaterale e una guida sicura. Anche le manovre in curva e su terreni irregolari possono essere effettuate comodamente.

FRENO IDRAULICO TETRA

Un'altra innovazione è il freno idraulico per tetraplegici, facile da usare e regolabile. È ottimizzato per le funzioni della mano più deboli e adatto alla maggior parte dei gradi di disabilità.

Questa versione non è disponibile di default, quindi ricordatevi di selezionarla.

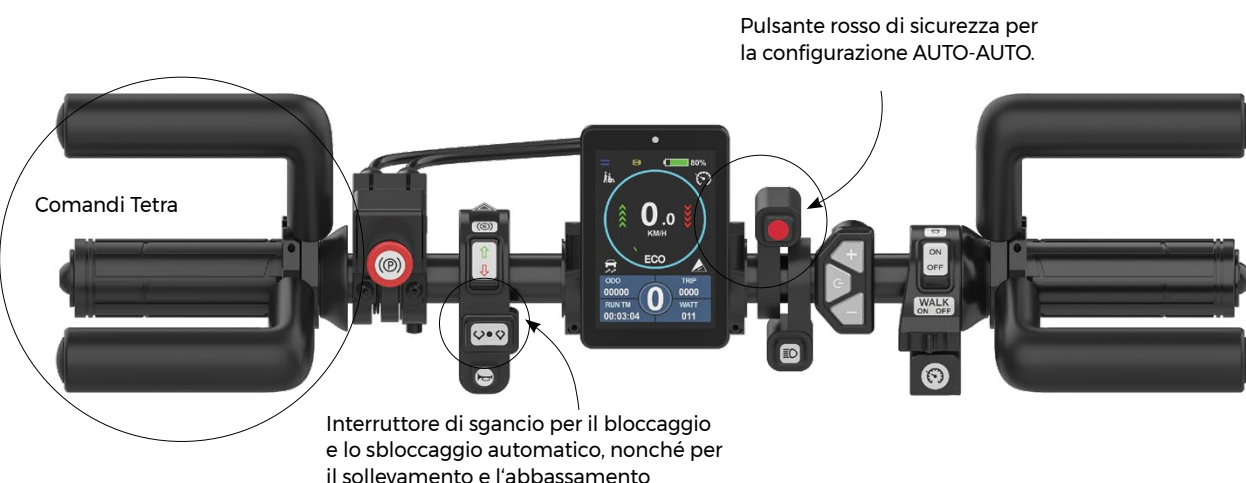

COMANDI TETRA CON IL „PULSANTE ROSSO DI SICUREZZA”

Il pulsante rosso è una funzione di sicurezza aggiuntiva. Deve essere premuto per attivare l'interruttore di sblocco della funzione AUTO-AUTO. Quando l'utente preme il pulsante rosso, ha a disposizione 20 secondi per azionare l'interruttore di sblocco. Ciò garantisce che l'interruttore di sblocco non possa essere attivato accidentalmente durante la guida.

5

ERGONOMIA E CONTROLLO

PAWS porta la praticità a un livello superiore. Ingegneri, ergonomisti e terapisti hanno lavorato insieme per creare il prodotto più comodo del mercato. Grazie alla possibilità di regolare l'altezza e la profondità, è disponibile un'ampia gamma di impostazioni che consentono di impostare il manubrio nella posizione ottimale per il comfort, a beneficio soprattutto degli utenti tetraplegici e non. Per il MORSETTO & SOLLEVAMENTO MANUALE è possibile impostare un interasse corto o lungo, la cosiddetta POSIZIONE DI GUIDA DUALE.

Il display è montato al centro del manubrio e può essere regolato nella posizione ideale. Le informazioni visualizzate comprendono la velocità, la distanza percorsa, lo stato della batteria e i sistemi di assistenza attivati. La luminosità del display si adatta automaticamente al livello di luce ambientale esistente.



Posizione di parcheggio



Posizione di guida



Posizione in città



Maniglie standard

CARATTERISTICHE SPECIALI

6

SISTEMI DI ASSISTENZA


CONTROLLO DI TRAZIONE

L'interruttore on/off del CONTROLLO DI TRAZIONE è posizionato sul lato destro del manubrio. Il CONTROLLO DI TRAZIONE mantiene la trazione delle ruote sulla strada in condizioni di guida scivolose o difficili. Con il suo aiuto si evita in gran parte lo slittamento delle ruote, ottimizzando così la trazione del PAWS.




LIMITATORE DI VELOCITÀ

È possibile impostare una velocità di camminata costante compresa tra 2 e 6 km/h.

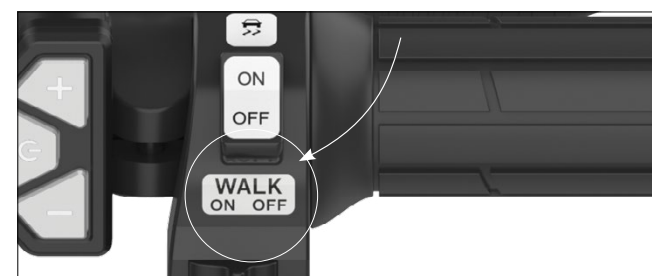

CRUISE CONTROL

È possibile impostare una velocità di guida costante per i viaggi più lunghi, senza dover mantenere l'acceleratore in posizione.

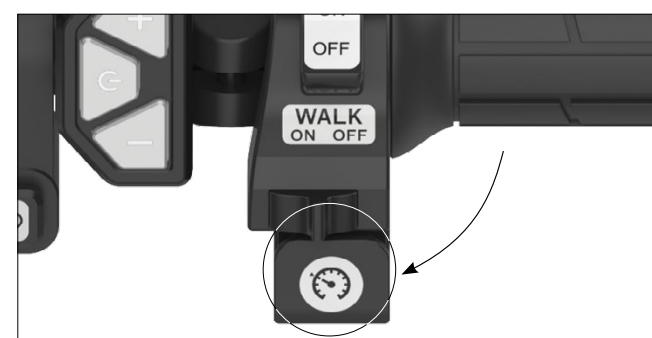

SUGGERIMENTO:

È possibile regolare l'intensità del controllo di trazione seconda delle esigenze individuali.

CONTROLLO DELLA PARTENZA IN SALITA (HAC)

Il controllo di assistenza alla partenza in salita (HAC) è una funzione di sicurezza fondamentale che consente agli utenti di partire in pendenza senza arretrare. Tenendo premuto il freno e accelerando contemporaneamente, l'utente può iniziare a muoversi con sicurezza in pendenza. Per attivare questa funzione, è sufficiente premere il pulsante HAC, che si illumina di rosso per 20 secondi. In questo lasso di tempo, il freno a T/freno viene disinserito, consentendo al freno a mano di funzionare come freno di stazionamento. Dopo l'intervallo di 20 secondi, il sistema reinserisce automaticamente il freno, garantendo una sicurezza continua.



7

VELOCITÀ


Il PAWS viene fornito a una velocità conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia di limiti di velocità o a un massimo di 15 km/h. Con l'aiuto di un interruttore a levetta è possibile passare dalla marcia avanti alla retromarcia. Per motivi di sicurezza, si consiglia di indossare il casco.

FRENI

PAWS è dotato di un sistema frenante ad assistenza elettrica. Dotato di un freno a disco, due leve freno e due pinze freno separate, PAWS punta alla massima sicurezza. Le due pinze dei freni sulla ruota motrice forniscono una migliore prestazione di frenata, oltre a essere una caratteristica di sicurezza. I freni possono essere azionati con una sola mano o con entrambe, se è necessaria una frenata pesante. Il sistema di frenata assistita elettricamente può essere facilmente regolato in base alle proprie esigenze tramite il display. Per motivi di sicurezza, questa regolazione deve essere effettuata dal rivenditore Rehasense.

FRENI A DISCO IDRAULICI

per comandi standard e Tetra, per mano destra e sinistra. Set completo di freni a disco idraulici. I nostri freni utilizzano olio minerale idraulico e i raccordi sono compatibili con i sistemi Shimano.

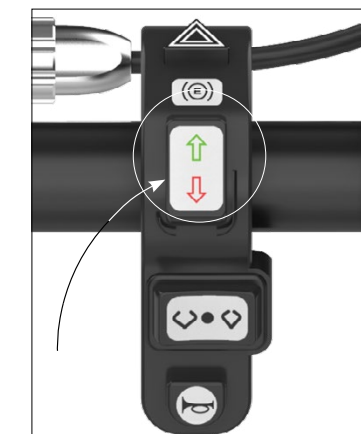

Marcia avanti e retromarcia



TRAIETTORIA ASSISTITA



TRAIETTORIA ASSISTITA

PAWS è dotato della nostra TRAIETTORIA ASSISTITA. Il sistema di sterzo autocentrante raddrizza il PAWS dopo aver lasciato il manubrio. Questo garantisce un maggiore comfort e soprattutto una maggiore sicurezza durante la guida.



* Si noti che nell'area di applicazione della legge sulla circolazione stradale (StVO), la velocità di 6 km/h non può essere superata senza assicurazione obbligatoria. Se si utilizza il PAWS a 10 o 15 km/h all'interno dell'area di applicazione dell'StVO, è necessaria un'omologazione individuale secondo l'StVO e un'assicurazione secondo la legge sull'assicurazione obbligatoria. Al di fuori della Germania, prima di utilizzare il PAWS è necessario informarsi dettagliatamente sulle norme e sulle disposizioni di legge specifiche del paese.

CARATTERISTICHE SPECIALI

STORIE VERE

8

BATTERIA

La batteria standard agli ioni di litio (48 V, 11,6 Ah) ha una capacità di 557 Watt / ora. Per una carica completa, la batteria richiede solo 5 ore di ricarica. Sulla parte superiore della batteria è presente un indicatore del livello di carica. Il caricabatterie intelligente si interrompe una volta raggiunta la carica completa. Con una carica completa è possibile raggiungere un'autonomia fino a 40 km (a seconda del terreno, del peso del conducente, del modello scelto e del tipo di guida). Con una comoda maniglia a strappo, si aggancia facilmente al supporto e si fissa in posizione con la propria chiave. È disponibile anche una batteria "da trasporto aereo" conforme alla normativa IATA, per portare il PAWS in volo. Il cambio della batteria è facile e veloce, quindi quando si sta esaurendo, è possibile sostituirla con una carica. Per i viaggi più lunghi, consigliamo di passare al supporto a doppia batteria.



Inserimento della batteria

PROTEZIONE DALL'ACQUA

Il PAWS ha un grado di protezione IP54 ed è quindi protetto da polvere e spruzzi d'acqua da tutti i lati. Quindi pioggia, pozzanghere o umidità non sono un problema.

ILLUMINAZIONE

PAWS è dotato di un potente proiettore a LED con luce abbagliante e anabbagliante. Le luci si accendono automaticamente di sera o in galleria.



„PAWS mi dà molta più libertà e indipendenza”.



Henry Manni, atleta finlandese su carrozzina, ha un curriculum impressionante, avendo vinto medaglie ai Campionati mondiali ed europei. In particolare, ha ottenuto una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016. Recentemente, ha ottenuto due medaglie di bronzo ai Campionati mondiali di para-atletica 2024 di Kobe, in Giappone.

„Ora sono il ragazzo più figo della scuola”.



Zack, uno studente di 14 anni, è stato dipendente da una carrozzina per 10 anni e a scuola si sentiva spesso deluso perché non era in grado di andare con i suoi amici quando uscivano in bicicletta.




COMPRESSORE PER PNEUMATICI

Il gonfiatore intelligente di pneumatici è dotato di una batteria ricaricabile integrata che aziona un mini-compressore per gonfiare gli pneumatici. La pompa rileva automaticamente i limiti di pressione impostati e si spegne. La ricarica avviene tramite la porta USB-C integrata. Un altro punto di forza è la luce LED, che trasforma il gonfiatore di pneumatici in una pratica luce flash.



BORSA

Migliorate il vostro PAWS con una pratica borsa da trasporto asportabile. È dotata di un ampio scomparto interno con molto spazio per riporre gli oggetti e di una chiusura a zip. È anche idrorepellente. Sul lato sinistro è presente una tasca esterna in rete che offre spazio sufficiente per una bottiglietta d'acqua. Altre due piccole tasche con cerniera sul davanti e sulla destra consentono di riporre in modo sicuro oggetti come le chiavi o lo smartphone. Per fissare la borsa è necessario un supporto composto da un portapacchi e da una staffa di sostegno, facile da installare. La borsa può essere semplicemente fissata sul portapacchi dall'alto. È inoltre possibile fissare la borsa con le cinghie in velcro in dotazione. Questa soluzione è particolarmente consigliata sui ciottoli e sui terreni irregolari.

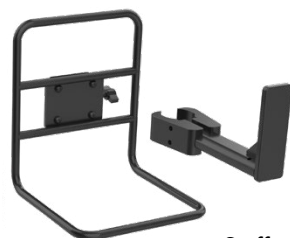

Staffe di montaggio



BATTERIA DA TRASPORTO AEREO

È disponibile anche una "batteria di volo" conforme alle norme IATA. La batteria da trasporto aereo (278 Wh) ha una capacità inferiore per poter essere trasportata sugli aerei passeggeri secondo le norme IATA. La sostituzione della batteria è semplice e veloce. Al momento della prenotazione del volo, informate la compagnia aerea che viaggerete con il PAWS e la carrozzina e che la batteria è conforme alle norme IATA.

SUPPORTO PER DOPPIA BATTERIA

Equipaggiate il vostro PAWS con una seconda batteria per estendere la vostra portata. È possibile passare facilmente alla batteria di riserva utilizzando l'interruttore a levetta sul DUAL BATTERY HOLDER. Questo aumenterà la vostra sicurezza, soprattutto nei viaggi più lunghi.



Aste di regolazione della larghezza: consentono di adattarsi a diverse larghezze di carrozzine.



IMBALLAGGIO

Il PAWS viene consegnato in un imballaggio robusto. Se possibile, conservatelo per la restituzione o il trasporto.

Ogni PAWS viene fornito con un set di chiavi a brugola

PEDANA

Siamo lieti di presentare la nostra innovativa soluzione di pedana per carrozzina con pedane rimovibili. Questo accessorio facile da montare migliora il comfort e il sostegno, integrandosi perfettamente con la carrozzina per fornire un poggiapiedi stabile e sicuro.

**SUPPORTO PER TELEFONO CELLULARE**


Il pratico supporto consente di avere lo smartphone sempre in vista e a portata di mano, perfetto se si desidera utilizzare un sistema di navigazione o effettuare telefonate quando si è in giro.

PESI PER PAWS

Vi presentiamo i pesi per PAWS progettati per fornire una trazione ottimale nelle situazioni più difficili. Questi pesi, di circa 10 kg in totale, possono essere regolati a 7,5 kg o a 5 kg in base alle vostre esigenze. Compatibili con tutti i modelli e le misure di PAWS, sono progettati esclusivamente per l'uso di cavaletti standard.

**RUOTE PER IL TRASPORTO**

Le nostre ruote per il trasporto, appositamente progettate, rendono il sollevamento del PAWS in auto un gioco da ragazzi. È sufficiente collegare le due ruote a ciascuna maniglia e posizionare il PAWS davanti al bagagliaio aperto dell'auto con le ruote in alto. Iniziare a sollevare il PAWS dalle ruote, in modo da poterlo spingere più facilmente nell'auto.

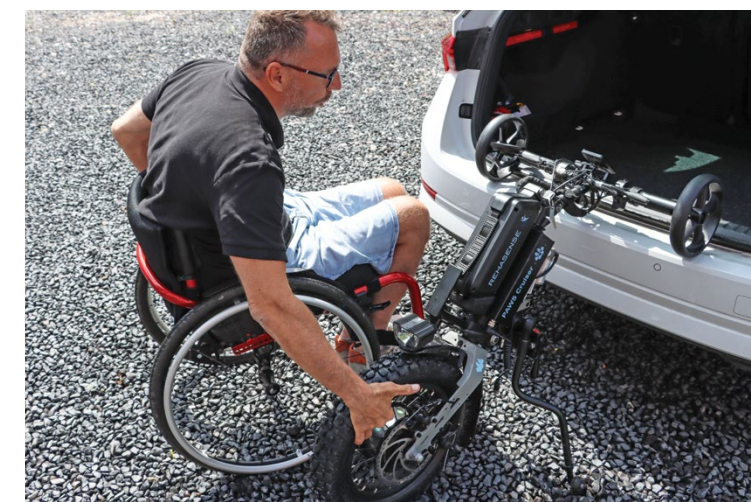**Avviso importante: Uso delle ruote di trasporto PAWS**

Prima di utilizzare le nostre ruote da trasporto, consultate il vostro rivenditore per verificarne l'idoneità. Assicuratevi di aver compreso i passaggi per evitare lesioni o danni al PAWS o al vostro veicolo. Sebbene le ruote di trasporto facilitino il sollevamento del PAWS, è necessario un certo livello di forza fisica.

TABELLA DATI TECNICI

					
	CITY 12"	CITY 14"	CRUISER 16"	TOURER 20" x 2"	TOURER 20" x 4" (FAT TYRE)
Misure (L x Px H)	800 x 490 x 810 mm	800 x 490 x 810 mm	820 x 490 x 860 mm	1000 x 520 x 920 mm	1000 x 520 x 920 mm
Peso totale	ab 22,5 kg	ab 23,4 kg	ab 24,24 kg	ab 25,4 kg	ab 25,9 kg
Peso senza batteria, morsetti e cavaletto	ab 15,26 kg	ab 16,02 kg	ab 17 kg	ab 18,18 kg	ab 18,68 kg
Peso di trasporto	18,2 kg	18,7 kg	23,1 kg	24,2 kg	25,5 kg
Peso massimo dell'utente	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Potenza del motore	350 W	400 W	500 W	500 W	500 W
Coppia massima del motore	45 Nm	60 Nm	78 Nm	87 Nm	87 Nm
Pendenza massima superabile	10%	10%	10%	10%	10%
Raggio di sterzata	100 cm	110 cm	120 cm	150 cm	150 cm
Batteria	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh
Misure della batteria (L x Px H)	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm
Peso della batteria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
Tempo di ricarica (ciclo completo)	5 hrs	5 hrs	5 hrs	5 hrs	5 hrs
Autonomia massima (stimata con batteria completamente carica e terreno pianeggiante)	40 km	40 km	38 km	35 km	35 km
Batteria da trasporto aereo	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh
Peso batteria da trasporto aereo	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg

* Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

3 MODELLI - 6 FUNZIONI - OLTRE 30 BREVETTI
IN CORSO DI REGISTRAZIONE



CITY
Ruote da 12" & 14"



CRUISER
Ruote da 16"



TOURER
Ruote da 20"

FUNZIONI



MORSETTO AUTOMATICO
Fissaggio automatico Serraggio e sbloccaggio in pochi secondi



SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
Sollevamento automatico Solleva e abbassa la carrozzina senza sforzo



CONTROLLI TETRA
Freno speciale Tetra Controllo totale senza sforzo



MORSETTO MANUALE
Robusto e sicuro Montaggio facile e universale



SOLLEVAMENTO MANUALE
Facile e veloce Sollevarsi comodamente in posizione di guida



TRAIETTORIA ASSISTITA
Maggiore comfort e sicurezza di guida. Il sistema di sterzo autocentrante raddrizza il PAWS dopo il rilascio



Scansionate il codice per guardare il nostro video "Summer fun" e vedere i nostri ICON 60 e PAWS in azione.

Configurazione illustrata:
ICON 60 + City 12 pollici,
comandi standard,
morsetti automatici
E SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO



ICON 60 LA CARROZZINA ATTIVA



PROGETTATA PER MOLTEPLICI REGOLAZIONI

La nuova carrozzina manuale ICON 60 è una delle carrozzine più regolabili attualmente disponibili. Quest'ultima novità della gamma REHASENSE, caratterizzata da un telaio rigido e leggero in lega di alluminio serie 7000 e da pannelli laterali in fibra di carbonio, è stata progettata per consentire all'utente di regolare vari elementi della carrozzina in base alle proprie esigenze. La lunghezza del telaio e l'angolo di seduta sono regolabili e per il massimo comfort, lo schienale - che è pieghevole per facilitare il trasporto di ICON 60 in auto - può essere regolato in avanti fino a 20° o indietro fino a 10°.

DATI TECNICI

Portata massima utente	120 kg
Peso (senza ruote e cuscino)	da 6.9 kg
Larghezza sedile	36-48 cm
Profondità sedile	42-46.5 cm (1.5 cm incremento)
Angoli di seduta	6°, 10°, 13°
Regolazione del baricentro	8 posizioni (1.3 cm incremento)

* Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

LE MIGLIORI COMBINAZIONI CON PAWS

ICON 30 FAF



Configurazione illustrata:
ICON 30 FAF + City 12",
MORSETTI AUTOMATICO
E SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO



ICON 30 FAF

LA CARROZZINA LEGGERA



STABILE E AFFIDABILE

ICON 30 FAF è una carrozzina estremamente stabile che può essere utilizzata per attività all'aperto. La carrozzina pieghevole con telaio anteriore fisso (FAF) offre diverse possibilità di regolazione e può quindi essere adattata alle esigenze dell'utente. A seconda del livello di attività dell'utente, è possibile selezionare diversi livelli di regolazione. L'angolo delle ruote anteriori è regolabile, consentendo un'ampia combinazione di altezze e angoli di seduta per supportare tutti i tipi di utenti della carrozzina.

DATI TECNICI

Portata massima	125 kg
Peso / Peso di trasporto	13.6 kg (9.6 kg)
Larghezza sedile	40, 45 cm
Profondità sedile	40, 45 cm
Larghezza da chiusa	35 cm
Larghezza totale	63, 68 cm

* Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

BRAND AMBASSADORS



Tomasz Biduś dopo aver partecipato al torneo di rugby QUFORA EGMONT OPEN 2022 in Danimarca.

SU TOMASZ BIDUŚ

Tomasz Biduś è un giocatore professionista di rugby in carrozzina e allenatore della nazionale brasiliana di rugby in carrozzina.

„Per me, in quanto persona in carrozzina, è estremamente importante avere a disposizione prodotti che soddisfino le mie esigenze e mi supportino nella mia vita mobile. Come atleta, ti spingi al limite e cerchi sempre di dare il meglio di te. PAWS è il sistema di alimentazione più innovativo per carrozzina. Dà una fantastica sensazione di mobilità illimitata”.

LA NOSTRA LINEA ATTIVA



SU TOMASZ ŁYKO

Tomasz Łyko è un rappresentante nazionale di basket in carrozzina e un istruttore di riabilitazione attiva.

Scansionate il codice per guardare il video “Friends” con i nostri ambassador Tomasz Biduś e Tomasz Łyko.



Il propulsore elettrico PAWS e la ruota anteriore TRACK WHEEL sono stati progettati per essere molto facili da attaccare e staccare dalla carrozzina. La carrozzina attiva ICON 60 è una delle carrozzine più regolabile attualmente sul mercato. Essendo così altamente adattabile l'utente può ottenere la posizione di seduta perfetta con un comfort e un supporto posturale ottimali.



REHASENSE

REHASENSE ITALY SRL
VIALE DELLE INDUSTRIE 5
20044 ARESE (MI) ITALY
☎ **+39.02.99 77 08**
✉ **INFO.ITALY@REHASENSE.COM**

REHASENSE DEUTSCHLAND GMBH
STERNBERGER STRASSE 12,
32699 EXTERTAL,
GERMANY
☎ **+49 2821 590 8587**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE DENMARK
GLARMESTERVEJ 16 A, ST. TV.
8600 SILKEBORG,
DENMARK
☎ **+49 176 588 788 01**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE UK LIMITED/IRELAND
UNIT 2, HARMONY HOUSE
TRELEIGH INDUSTRIAL ESTATE
REDRUTH, CORNWALL TR16 4DE
UNITED KINGDOM
☎ **+44 (0) 333 220 0704**
✉ **UKADMIN@REHASENSE.COM**

REHASENSE SP. Z O.O.
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND
☎ **+48 880 331 272**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE BENELUX
MARKEWEG 81
8398GM BLESIJKE,
NETHERLANDS
☎ **+31 653 837 211**
✉ **INFO@REHASENSE.NL**

REHASENSE SVERIGE AB
POLHEMSGATAN 28, SE-392 39 KALMAR
SWEDEN
☎ **+46 722 325 090**
✉ **MATS.LAVEBORN@REHASENSE.COM**

REHASENSE CHINA
NO.289, WENGJIAO ROAD
XINYANG INDUSTRIAL AREA
361022 HAICANG, XIAMEN,
CHINA
☎ **+86 592 688 4014**
✉ **EVELYN.CHEN@REHASENSE.COM**

REHASENSE KOREA
1F. 338-46, DONGBUSUNHWAN-RO,
WONJU-SI 26454 GANGWON-DO,
REPUBLIC OF KOREA
☎ **+82 070 4216 3429**
✉ **JONGSUNG.KIM@REHASENSE.COM**

REHASENSE NEW ZEALAND
UNIT 4, 260 APIRANA AVENUE
GLEN INNES, AUCKLAND, 1072,
NEW ZEALAND
☎ **+09 555 3111**
✉ **NZ-INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE MOBILITY CANADA LTD
137 BUTTERMILL AVENUE
CONCORD, ONTARIO, L4K 3X5
CANADA
☎ **+1 289 654 1901**
✉ **INFO.CANADA@REHASENSE.COM**

REHASENSE USA
1333 BURR RIDGE PARKWAY, SUITE 200
BURR RIDGE, IL 60527,
USA
☎ **+1 630 756 3099**
✉ **INFO-USA@REHASENSE.COM**

REHASENSE MENA
QETAF MEDICAL EST
3599 PRINCE MOHAMMED BIN
ABDULAZIZ ST,
SAUD LANGAWI CENTER, AL ANDALUS
JEDDAH 23326,
SAUDI ARABIA
☎ **+96 650 664 1993**
✉ **SALES-MIDDLE-EAST@REHASENSE.COM**

REHASENSE COLOMBIA
CALLE 171 # 21 A 47
BARRIO LA URIBE, BOGOTÁ
COLOMBIA
☎ **+57 3153118652**
✉ **IVANUMANA@REHASENSECOLOMBIA.COM**

REHASENSE AUSTRALIA PTY LTD
☎ **+61 475 856 207**
✉ **WERNER.PETZER@REHASENSE.COM**



Il sistema di Qualità Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come da certificazione TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense sono marcati CE e rispettano i requisiti della Direttiva Europea 2017/745 (MDR)

Copyright Rehasense® 2024



VI-2024